




Inhoud/Inhalt/Contents

- 4 x
- 4 x
- 4 x
- 4 x
- 1 x

Wasvoorschrift/Reinigung/Washing instructions

-
-
-
-

Version 1.0
CE 93/42/EEG

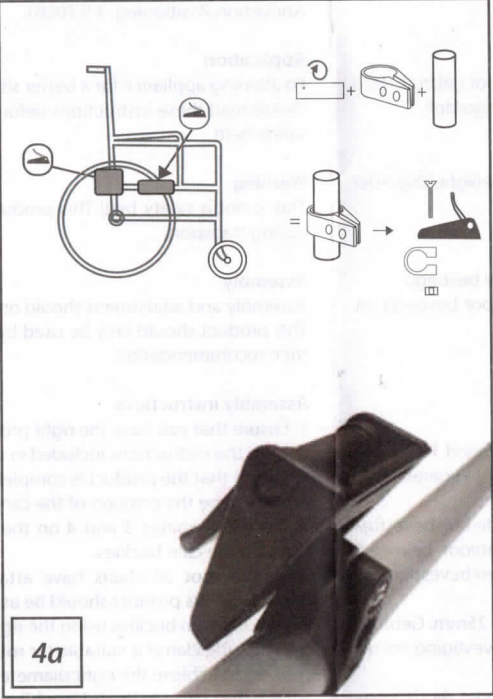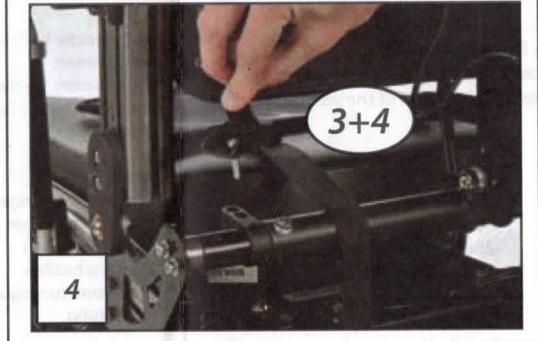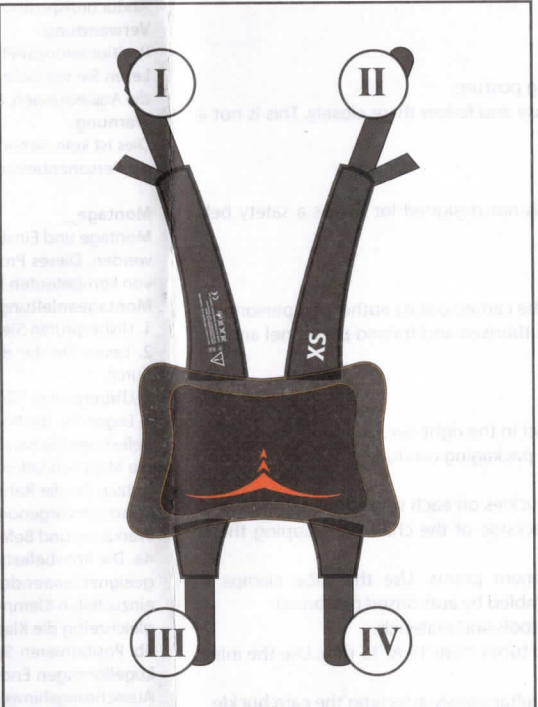

Abdukčné popruhy

Použitie:

Polohovacia pomôcka pre lepšie držanie tela. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod a dôsledne ho dodržiavajte. Toto nie je bezpečnostný pás!

VAROVANIE

Toto nie je bezpečnostný pás! Tento výrobok nie je navrhnutý na použitie ako bezpečnostný pás počas prepravy.

Montáž

Montáž a nastavenie smie vykonávať iba autorizovaná osoba. Tento výrobok by mala používať iba oprávnená a vyškolená osoba a na jej odporúčanie.

Postup montáže:

1. Zaistíte, aby ste mali správny produkt v správnej veľkosti.
2. Pozorne si prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou balenia.
3. Zaistíte, aby bol produkt kompletný.
4. Určíte polohu zámkov praciek na každej strane popruhu 1 a 2. Popruhy 3 a 4 na zadnej strane vozíka pripevníte tak, že ich prevlečiete cez zámkov.

POZOR

Nie všetky vozíky majú pripevovacie body. V prípade potreby použite rúrkové svorky. Tento výrobok by mala zostavovať autorizovaná osoba. Pripevnite spony pomocou správnych nástrojov a materiálov.

4a. Objímka je vhodná pre oválne rúrky od 19 do 15 mm. Na dosiahnutie správneho priemeru použite vložkové gumené. Pripevnite sponu k trubici a súčasne pripevnite zámkov pracky.

4b. Umiestnite sedenie do požadovanej polohy na vozíku tak, aby sedacie kosti spočívali v strede sedenia. Všimnite si smerovú značku na sedení. Označenie musí byť viditeľné a smerovať dopredu.

5. Umiestnite klienta na vozík, na sedáciu časť polohovania.
6. Popruhy 1 a 2 previažte sponami a pripevnite ich v správnom smere.
7. Úprava popruhov 1,2. Vyvarujte sa nepríjemnému tlaku a v pravidelných intervaloch ho zmierňujte. Ak klient trpí vaskulárnym ochorením alebo zvýšenou citlivosťou, nehýbte s panvou ale najskôr vyhľadajte radu od lekára. Za žiadnych okolností nesťahujte plienky a / alebo vývody.
8. Pomocou držiakov popruhov zafixujte konce popruhov. Zaistíte, aby boli popruhy mimo dosahu pohyblivých a otáčajúcich sa častí vozíka.
9. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie popruhov, pásov a polstrovaných častí. Denne kontrolujte úroveň pripevnenia a napätia popruhu.
10. Počas používania je možné popruhy otvoriť a upevniť pomocou bočných uvoľňovacích spôn na popruhoch 1 a 2

Údržba

Ručné pranie pri maximálnej teplote 30 °C. Nepoužívajte sušičku. Každý týždeň kontrolujte opotrebovanie úroveň pripevnenia a napätia popruhu.

ne kontrolujte

Balenie obsahuje:

- 4 rúrkové svorky
- 4 držiaky popruhov
- 4 zámkov praciek
- 4 spony zámkov
- 1 abdukčné popruhy
- 1 návod

Výrobca:

Positioning Products BV
Postbus 82316
2508 EH Den Haag
Holandsko
www.positioning-products.nl
info@positioning-products.nl

Distribútor:

LETMO SK, s.r.o.
Mládežnícka 8
Banská Bystrica
97404
www.letmo.sk
info@letmo.sk
0800 194 984

