

Zmiernenie tlaku

Cieľom tejto písomnej informácie pre používateľov je pomôcť vám pochopiť, prečo je úroveň podpory, pohodlia a zmiernenia tlaku poskytovaná v sedačke GoTo taká dôležitá pre blaho vášho dieťaťa.

Typ sedačky:

Sedací systém: Táto sedačka poskytuje vášmu dieťaťu stredné až vysoké zmiernenie tlaku a je navrhnutá ako hlavná sedačka pre vaše dieťa.

Prenosná sedačka: Táto sedačka poskytuje mierne až stredné zmiernenie tlaku (záleží to od veľkosti dieťaťa) a je navrhnutá tak, aby v nej vaše dieťa mohlo sedieť krátku dobu, keď je vonku alebo dnu.

Polstrovaná sedačka:

GoTo polstrovaná sedačka na zmiernenie tlaku sa skladá z kombinácie pamäťových a podporných pien, ktoré poskytujú miernu úľavu od tlaku a zlepšujú rozloženie tlaku.

Polstrovaná sedačka a valec sa môžu používať spoločne alebo samostatne na zabezpečenie posturálnej opory a stability panvy - umiestnenie valca pod tvarovaný vankúš/sedačku pomôže pohodliu a stabilite a zníži riziko natiahnutia (lýtkového svalu) u tých, ktorí majú korekčnú obuv alebo AFO.



Informovanosť:

Terapeuti by mali rodičom poskytovať poradenstvo o dôležitosti polohovania na dosiahnutie správneho držania tela v sede.

Pokožka:

Pravidelne kontrolujte podráždenie alebo začervenanie pokožky vášho dieťaťa. Niektoré sčervenanie po sedení je normálne, ale malo by zmiznúť po 15 - 20 minútach. Ak sčervenanie pretrváva aj po tejto dobe, prestaňte produkt používať a vyhľadajte pomoc svojho lekára alebo terapeuta.

Polohovanie:

Odporúča sa zmeniť polohu dieťaťa každé 2 hodiny. Ak je vaše dieťa schopné asistovať pri zmene polohy, povzbudzujte ho, aby sa otáčalo na jednu stranu alebo sa naklonilo dopredu, aby pomohlo prerozdeliť jeho hmotnosť.

Tlak + čas = poškodenie pokožky

Ak máte akékoľvek pochybnosti o sedení vášho dieťaťa alebo o úrovni pohodlia a podpory, obráťte sa na svojho terapeuta.