

# firefly WeGo

Náš tím zostavil niekoľko najlepších tipov a rád, ktoré by sa vám mohli hodiť, aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť kočík WeGo.




Používanie sedačky GoTo s kočíkom WeGo mierne zníži hĺbku sedačky.

**Poznámka:** WeGo neposkytuje žiadnu posturálnu oporu bez použitia sedačky GoTo.

1

Ak hĺbka sedačky vášho dieťaťa je nameraná na **26 cm alebo menej** – nastavte opierku na najvyššie možné nastavenie. **A**

To zabráni skĺznutiu vášho dieťaťa dopredu. **B**

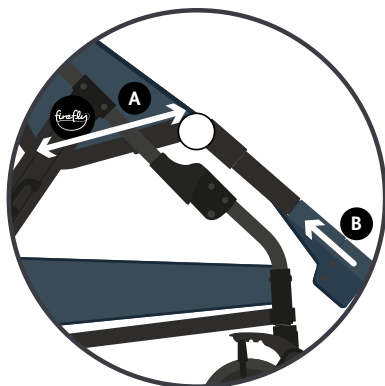

2

Polstrovaná poduška GoTo na zmiernenie tlaku sa dá použiť spolu s GoTo a kočíkom WeGo. Umiestnením penovej rolky pod poduškou sa zvýši sklon sedačky, čo môže pomôcť stabilizovať panvu.

**Poznámka:**

Ak tak urobíte, znížite výšku sedačky GoTo.



3

Sklopenie do ležatej polohy, zmenšenie uhla podnožky alebo kombinácia oboch úkonov pomôže dieťaťu pri umiestnení a upevnení podkolenia.

