


Wheelblades S - návod k použití

Přehled


komplet **Wheelblades S** (pravá lyže)

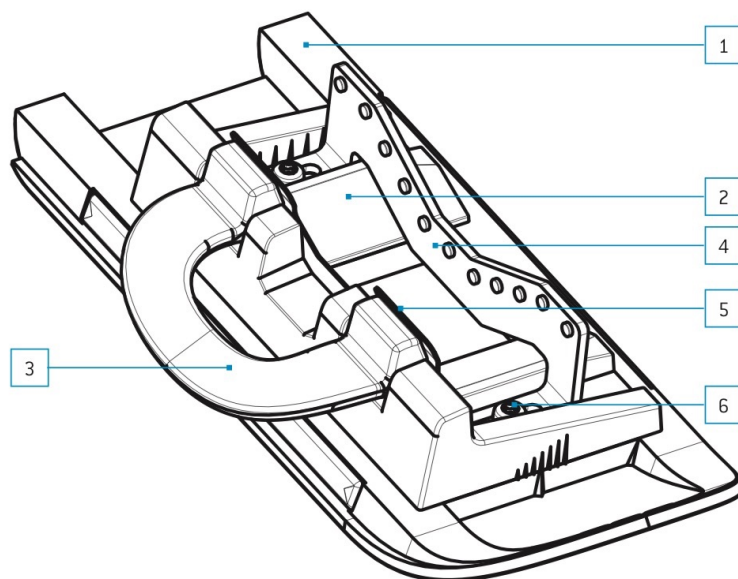

1. lyže - **plast**
2. vázání (vybrání na kolečko - kolíbka) - **plast**
3. upínací klapka - **hliníková slitina**
4. doraz kolečka - **ocel**
5. pružný plechový doraz - **ocel**
6. fixační šroub - **ocel**

Obecné

Obsah balení

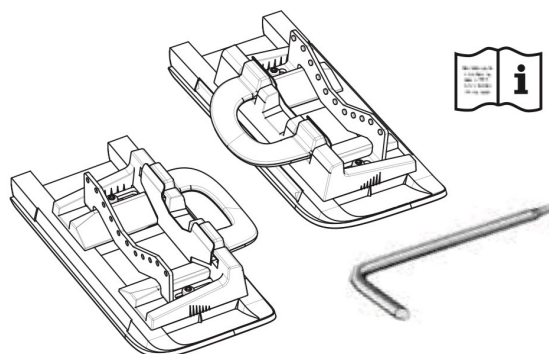

2x lyže **Wheelblades S** (komplet s namontovaným upínacím mechanismem)
1x montážní klíč "torx" T25
1x návod k použití

Záruka

Společnost **Wheelblades** poskytuje záruku na bezchybný a funkční výrobek. Záruka se vztahuje na všechny chyby a vady, které prokazatelně vznikly v důsledku chybné konstrukce, špatného výběru materiálu nebo nedostatečné kontroly při výrobě. Záruční doba je 2 roky od data nákupu. Ze záruky jsou vyloučeny následující body:

- běžné opotřebení v důsledku používání
- poškození nesprávnou manipulací
- zanedbání údržby
- poškození nesprávnou montáží
- vady způsobené vnějšími okolnostmi
- vady způsobené výrobcem neschválenými úpravami
- poškození způsobené použitím nevhodných náhradních dílů
- následné náklady nejsou součástí záruky
- použití v půjčovnách (výrobek není určen k opětovnému častému nastavování rozměrů koleček)

Bezpečnost Správné používání

Wheelblades S se používají pro jízdu po cestách s **ujetým sněhem** bez posypu!. Nejsou vhodné pro jízdu na zledovatělém povrchu, v hlubokém sněhu nebo cestách jen částečně sněhem pokrytých. Nejsou určeny pro použití na lyžařských nebo sáňkařských tratích a podobně.

Wheelblades S jsou určeny pouze pro ručně poháněné (mechanické) invalidní vozíky.

Uživatelé (uživatelé invalidních vozíků, asistenti) musí být odpovědní za své chování a musí si přečíst a pochopit návod k obsluze.


Wheelblades S musí být namontovány pouze na přední kola invalidních vozíků. Jsou určeny pro průměry kol od 80 do 200 mm a šířky od 20 do 60 mm.

Wheelblades S slouží k rozšíření jízdních vlastností invalidního vozíku. **Není to sportovní zařízení!**

Pozor!

Nedodržení určeného použití může vést k nebezpečným situacím, které by mohly vést k vážnému zranění nebo smrti.

Technická data

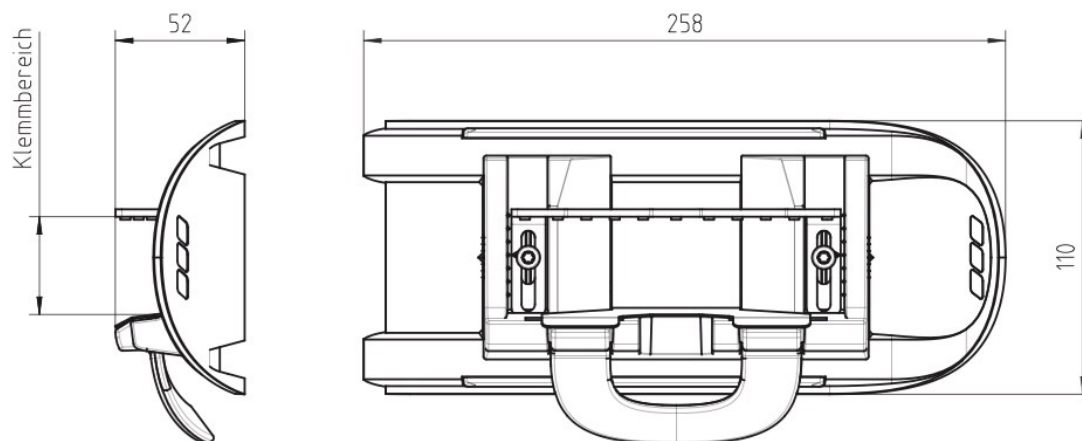

Wheelblades S

šířka lyže 110 mm

délka lyže 258 mm

rozmezí upínacího mechanismu (Klemmbereich)

šířka kolečka 20 - 60 mm

průměr kolečka 80 - 200 mm

Popis funkce upínacího mechanismu


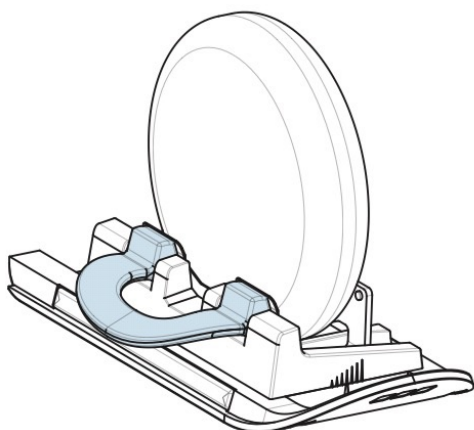


Abb. 4: Klemm-Mechanismus offen

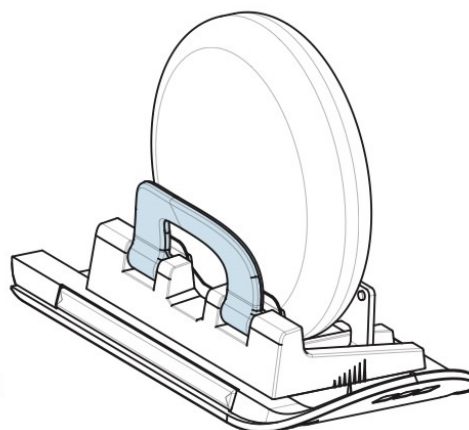

Klemm-Mechanismus geschlossen

Upínací klapka vodorovně - mechanismus otevřen, upínací klapka svisle (nahoru o 90*) - zajištěno.

Nastavení

Wheelblades S se mohou používat pouze na přední kolečka invalidních vozíku (chodítek, rolátorů a pod.) o průměru od **80** do **200** mm a šíři od **20** do **60** mm.


Pokud jsou kolečka Vašeho vozíku (nebo kočárku) větší - použijte Wheelblades XL !

Wheelblades S nejsou při prodeji nastaveny na žádný rozměr koleček. Před prvním použitím a nasazením si je musíte přizpůsobit nastavením upínacího mechanismu sami.

První nastavení


K nastavení šíře upínacího mechanismu slouží vždy dvě stupnice u každého upínacího šroubu. Vnitřní (innere Skala) a vnější (äussere Skala), vpředu a vzadu. Na každé lyži jsou tedy na upínacím mechanismu čtyři stupnice (obr. 5)

obr. 5

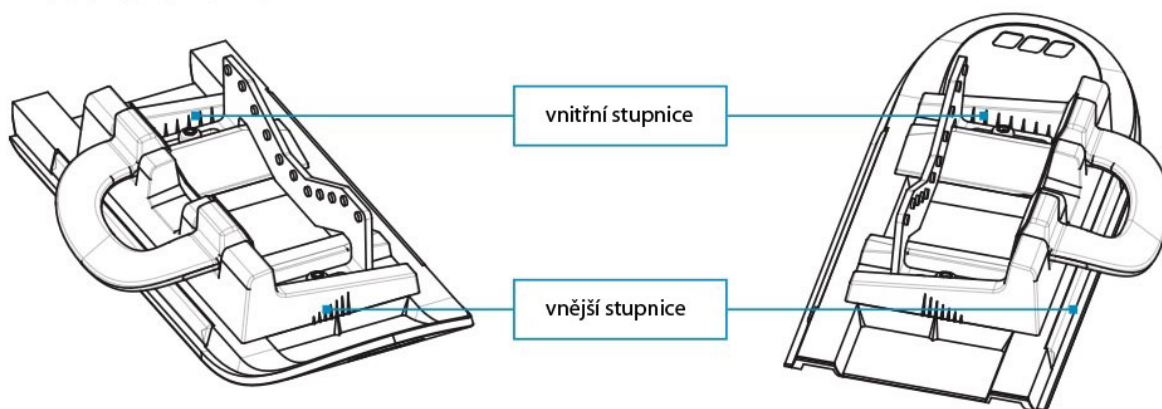


Rozměrům (šířce kolečka) odpovídají značky (po 5 mm) podle obrázku 6. Proti odpovídající značce se nastavuje referenční znaménko na lyži.

obr. 6

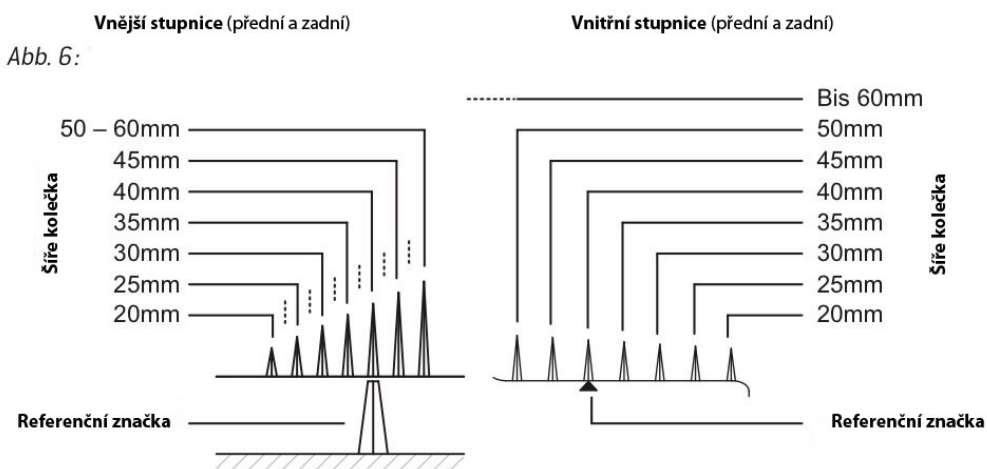


- 1 - Povolte zajišťovací šrouby "torx" (T25) - můžete použít přiložený klíč, aby vázání bylo volné.
- 2 - Změřte šířku vašeho předního kolečka (například 31,5 mm).
- 3 - Zaokrouhlete rozměr na mm (nahoru).
- 4 - Nastavte vázání tak aby referenční znaménko bylo co nejbližie vašemu rozměru. Znaménko může být na stupnici i uprostřed značek tzv. "mezi zuby" (obr. 7) rastr stupnice je jemnější.
- 5-6 - Dejte pozor aby nastavení bylo stejné na všech stupnicích a utáhněte zajišťovací šrouby.

obr. 7 příklad nastavení pro rozměr 32 mm na vnější stupnici

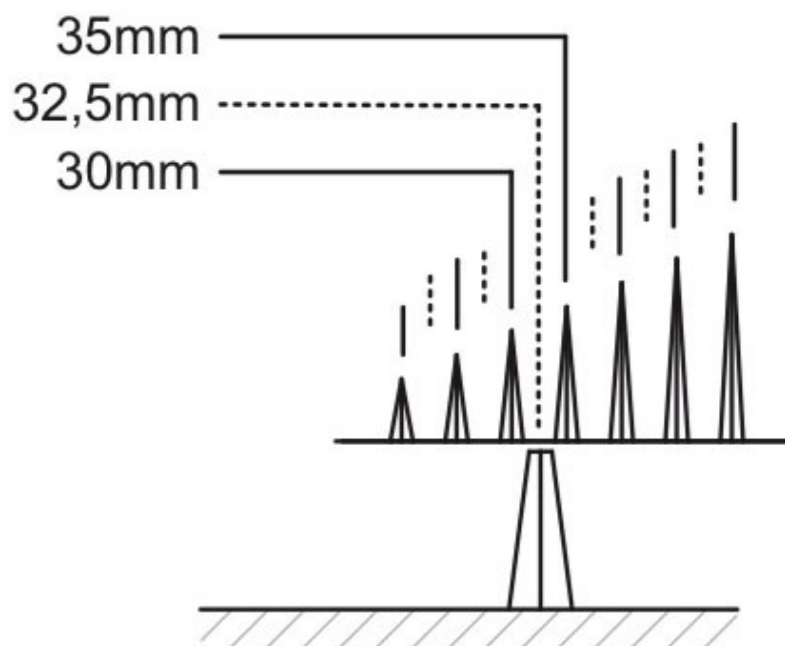

obr. 8 pro vnitřní stupnici a rozměr 32 mm

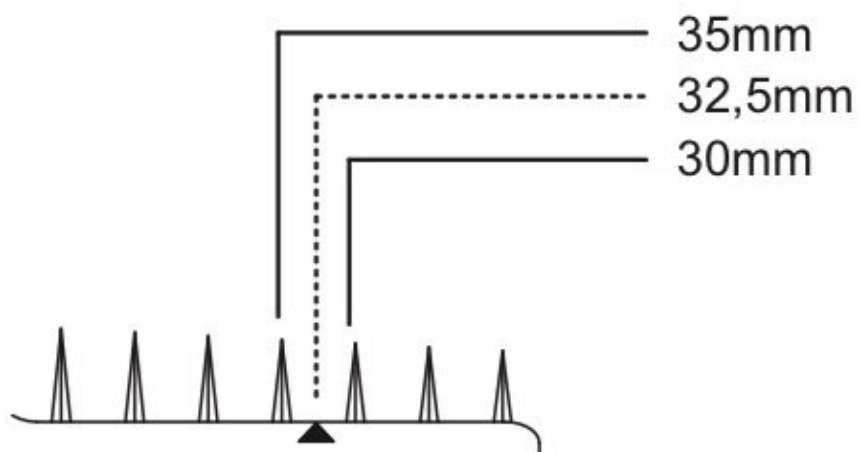

- 8 - Zkontrolujte nastavení upínacího mechanismu - položte lyži na zem, otevřete vázání (klapka vodorovně), vložte kolečko a utáhněte klapkou (zvedněte klapku o 90° nahoru). Lyže má nyní držet na kolečku. Pokud lze lyži lehce z kolečka sundat (při zavřené klapce), musíte znovu povolit zajišťovací šrouby a vázání ještě o několik milimetrů posunout. Zmenšit šíři a šrouby znovu utáhnout.
Bod 8 kontrolu nastavení opakujte dokud lyže na kolečku bezpečně nedrží.
9 - Stejně postupujte (body 1- 8) i u druhé lyže.

Pozor!

Při nesprávném nastavení, nebo pokud nejsou dostatečně dotaženy zajišťovací šrouby, mohou **Wheelblades S** během používání upadnout!
Nastavení je potřeba provést správně a pečlivě.

Nasazení/sundání lyží

Před prvním nasazením **Wheelblades S** na váš invalidní vozík musíte správně nastavit upínací mechanismus. Postupujte podle kapitoly 5.

Pozor!

Před každým používáním (nasazením) zkontrolujte **Wheelblades S** zda nejsou poškozené (prasklé a pod.) nebo nejsou povolené upínací šrouby.

Pozor!

Při nasazování **Wheelblades S** na kolečka (i při sundávání) hrozí skřípnutí prstů!!

Nasazení lyží

1 - Zkontrolujte **Wheelblades S** - dotažení šroubů.

2 - Vázání a prostor pro kolečko musí být před nasazením čisté (bez sněhu a pod.).

3 - Položte "pravou" lyži před "pravé" přední kolečko vašeho vozíku. Upínací mechanismus musí být otevřen (klapka směřuje vodorovně ven) a lyže ve směru jízdy (špička dopředu) obr. 9.

4 - Nadzvedněte vozík a položte "pravé" přední kolečko na lyži do vybrání (kolíčky) mezi doraz a pružinovou destičku u klapky. Kolečko s přední vidlicí musí být v pozici jízdy dopředu - tzn. vidlice předního kolečka musí směřovat dozadu! obr. 10.

5 - Když je kolečko správně usazeno ve vybrání lyže, zvedněte klapku o 90° nahoru až nadoraz obr. 11.

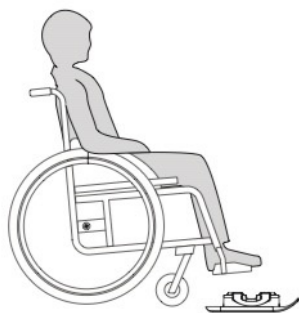


Abb. 9



Abb. 10

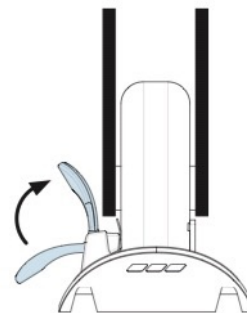


Abb. 11

6 - Vyzkoušejte že **Wheelblades S** na kolečku drží.

7 - Zopakujte body 1- 6 i u druhé lyže.

Pozor!

Při nasazování **Wheelblades S** - nadzvedávání předních koleček vozíku se může vozík převrátit!
Vozík zabrzděte a požádejte o asistenci!

Sundání lyží

1 - Zablokujte (zabrzděte) vozík.

2 - Odjistěte klapky na lyžích do vodorovné polohy.

3 - Zvedněte kolečka z lyží.

Pozor!

Možnost překlopení vozíku - asistence!

Jízda s Wheelblades

S nasazenými lyžemi lze s vozíkem jezdit stejně jak jste normálně zvyklí. Chová se však jinak, proto proto první jízdu opatrně vyzkoušejte na bezpečném místě (dostatek volného prostoru a na rovině!) a rozhodně s asistencí!

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze vašeho vozíku. **Wheelblades S** jsou pouze doplněk k rozšíření jeho jízdních vlastností.

Při jízdě s **Wheelblades S** dávejte vždy pozor (zvýšená pozornost!) a používejte vozík s nasazenými **Wheelblades S** pouze na cestách s ujetým směhem.

Pozor!

Na jakékoli cizí předměty (větvíčky, kamínky a pod.) nebo sněh v upínacím mechanismu. Mohou být příčinou toho že se mechanismus otevře a lyže z kolečka spadnou.

Pozor!

V hlubokém sněhu se **Wheelblades S** mohou zaseknout nebo vzpříčit. Na ledu lyže nevedou.

Nejezděte v hlubokém sněhu.

Nejezděte po posypaném sněhu (štěrk, písek a pod.) a po asfaltu.

Nejezděte na ledu (zledovatělých cestách).

Couvání

Zvláštní pozornost věnujte couvání s vozíkem s nasazenými **Wheelblades S**. Pokud při couvání nadlehčíte přední část vozíku, kolečka s **Wheelblades S** se mohou překlopit!

Pozor!

Necouvejte s **Wheelblades S** pokud nemáte dostatečně zatížená přední kolečka. Ideálně pouze s asistencí.

Údržba

Při poškození lyží - přílišném opotřebení - je možno zakoupit náhradní lyže (bez upínacích mechanismů) jako náhradní díl.

Potíže - odstranění

Kolečko nejde správně upnout

- zkontrolujte nastavení správné šířky (kap. 5)
- při nastavování se nepostupovalo správně
- vyčistěte vhloubení pro kolečko na lyži od sněhu a jiných předmětů...

Likvidace

Po rozebrání **Wheelblades S** na jednotlivé části lze tyto likvidovat (recyklovat) obvyklým způsobem. Typ materiálu každé položky je uveden v přehledu na začátku návodu.